

Factor VIII (Chromogenic assay)*、Factor VIII Inhibitor (Chromogenic assay)* 採血注意事項

醫院填寫**檢測申請單**
病患(本人或監護人)簽署**監測同意書**

黏貼**樣本條碼貼紙**於**檢測申請單**之barcode欄位、
藍頭抗凝血管及**2管冷凍小管**

藍頭抗凝血管採血 **1.8 mL x 2 管** / 每項

藍頭抗凝血管**上下180度翻轉8次混勻**

藍頭抗凝血管立即**離心**(室溫, 1500xg, 15 mins)

用無菌吸管**吸取上層血漿**(大約1~1.5 mL, 淡黃色)

平均分裝血漿至**2管冷凍小管**中
(每管 ≥ 0.5 mL) 且貼上**樣本標籤**

2管冷凍小管放入**5*5格塑膠盒**保存




立即冷凍保存於**-70 °C**冷凍櫃
(如無-70 °C冷凍櫃, 可暫存於-20 °C,
並立即通知賽亞收件)

不可解凍回溶

確實完成**檢測申請單**
(採血日期、採血時間、開始離心時間、保存溫度、
入冷凍櫃時間)



上下180度
輕柔混合均勻
共8次

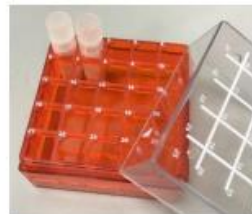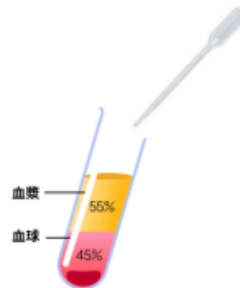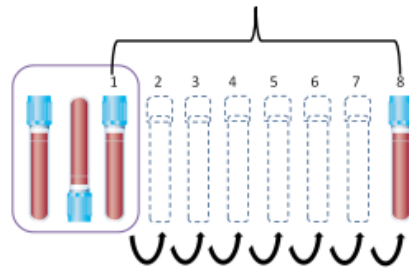

採血→血漿冷凍保存
在1小時內完成

