

### 送檢資料

送檢單位	嘉義基督教醫院	採檢日期		送檢日期	
姓名		出生日期		身分證號	
病歷號碼		性別	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女		
檢測項目	<input type="checkbox"/> Vit A <input type="checkbox"/> Vit E <input type="checkbox"/> Vit B1 <input type="checkbox"/> Vit B2 <input type="checkbox"/> Vit B5 <input type="checkbox"/> Vit B6 <input type="checkbox"/> 多元不飽和脂肪酸套組 (PUFAs) <input type="checkbox"/> Vit C				

### 採檢須知

檢測名稱	採檢需求
Vitamin A/E/ PUFAs	紫頭採檢管 (K2-EDTA) 新鮮採檢， <u>2 小時內離心</u> ，以 1.5~2mL 棕色避光 eppendorf 分裝 2 管， <u>冷凍</u> 保存寄送。
Vitamin B5/C	綠頭採檢管 (Heparin) 新鮮採檢， <u>2 小時內離心</u> ，以 1.5~2 mL 棕色避光 eppendorf 分裝 2 管， <u>冷凍</u> 保存寄送。
注意事項 1. 若無法立即離心以 eppendorf 分裝冷凍，請將採檢管以鋁箔包裝避光，先放入冰箱冷藏。 2. 若使用無避光的 eppendorf，請用鋁箔包裝避光。 3. 請將分裝管放入檢體袋冷凍保存運送。	

檢測名稱	採檢需求
Vitamin B1/B2/B6	紫頭採檢管 (K2-EDTA) 新鮮採檢， <u>不要</u> 離心， <u>2 小時內</u> 以 1.5~2mL 棕色避光 eppendorf 分裝 2 管， <u>冷凍</u> 保存寄送。
注意事項 1. 若無法立即以 eppendorf 分裝冷凍，請將採檢管以鋁箔包裝避光，先放入冰箱冷藏。 2. 若使用無避光的 eppendorf，請用鋁箔包裝避光。 3. 將分裝管放入檢體袋冷凍保存運送。	

### 聯絡資訊

奇美醫院精準醫學核心實驗室    連絡電話：(06)2812811#53624  
 檢體寄送住址：台南市永康區中華路 901 號研究大樓 B1 精準醫學中心