

# Synovial fluid specimen collection 注意事項

## 1. 說明：

紫頭試管已改用粉末抗凝劑，屆時將影響Crystal之判讀。因此當需確認是否有Crystal存在時，須使用紅頭試管來觀察。

## 2. 操作建議：

2.1. 抽取前Syringe限10 mL以內的空針需先潤濕sodium heparin抗凝固劑，若超過10 ml以上的關節液會造成抗凝劑效果不足，導致關節液凝固而無法檢驗。

2.2. 抽取量儘可能有9 ml，然後拔針頭，再依檢驗項目進行容器分裝。

檢驗項目	檢體量	容器	提供容器單位
Routine exam (包含 Cell count、WBC DC)	2-3 ml	EDTA 紫頭管	供應室
生化項目及 ※ <b>Crystal</b> 、Mucin clot (屬 Routine exam)	3-5 ml	紅頭塑膠管替代	庫房
細菌培養、染色	2-3 ml	針筒(以無菌綠色安全頭帽蓋住)	無菌安全頭帽—供應室

2.3. 如有其他疑問可洽詢檢驗科門診檢驗分機：(05)2765041轉分機2525、5208龔組長

嘉義基督教醫院檢驗醫學科