



QuantiFERON-TB Gold Plus 檢體採集送檢注意事項

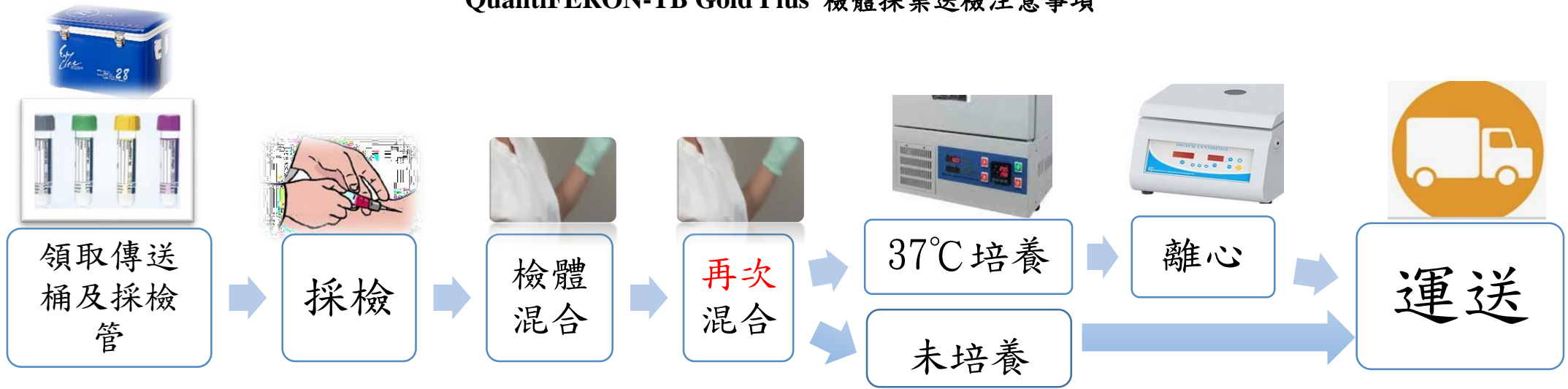

<p>(採檢管儲存至 4-25°C) 傳送桶內放置:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2 個冰寶 電子溫度計 檢體架 <p>(冰寶回各院所, 請置於冷凍庫或負 20 冰箱, 送檢前再放入傳送桶內) ★有大批檢體, 請事先聯絡血清室, 一次最多送 100 組</p>	<p>(檢體採集時, 溫度處於 17-25°C) 採集順序: 灰頭→綠頭→黃頭→紫頭管。 ★順序千萬不能錯, 錯了請重採。 ★每支血液抽到黑色刻度位置, 檢體量各為 1c.c (0.8-1.2 c.c 允收), 應確保檢體量正確。</p>	<p>單手同時夾緊 4 支採檢管, 以手肘為圓心, 上下振搖 10 次, 弧度超過肩膀, 以確保整個試管內層都被血液覆蓋, 為確保試管內含物與血液完全混合。 血液收集並搖晃之後未能直接培養請置於室溫 17-27°C, 在 37°C 培養之前, 請將採血管再次混合 10 次。 檢體混合影片參考: </p>	<p>37°C 培養 16 小時內, 以直立檢體方式於 37±1 °C 溫箱(請勿一直開關溫箱)培養 16-24 小時。請勿放入冰箱。</p> <p>未培養 院內病房檢體, 或委檢機構檢體不方便培養, 請於 16 小時內送達實驗室。</p>	<p>培養後檢體以 2000 g, 15 分鐘離心。</p>	<p>已培養(已離心)檢體, 低溫 2-8°C 傳送。 ★放置 2 個冰寶, 維持溫度在 2-8°C。</p> <p>未培養(未離心)檢體, 採檢後 16 小時內, 室溫 17-27°C 傳送。 ★不放置或放置 1-2 個冰寶, 維持溫度在 17-27°C, 需以紙板或泡泡紙隔開, 勿直接碰觸檢體。</p>
--	---	---	--	--------------------------------	--