


Panbio 新冠病毒抗原快篩樣本採集送件說明

一、採集鼻腔拭子(Nasal)

- 1.採集鼻腔拭子檢體時，請將拭子小心伸入鼻孔中(約 2 公分)。
- 2.將棉籤靠著鼻孔內側旋轉 5 次，同時用手指向鼻孔外側施加壓力。
- 3.用相同的棉籤在另一個鼻孔上重複剛才的動作。
- 4.自鼻腔內取出拭子放回專用檢體萃取液管。

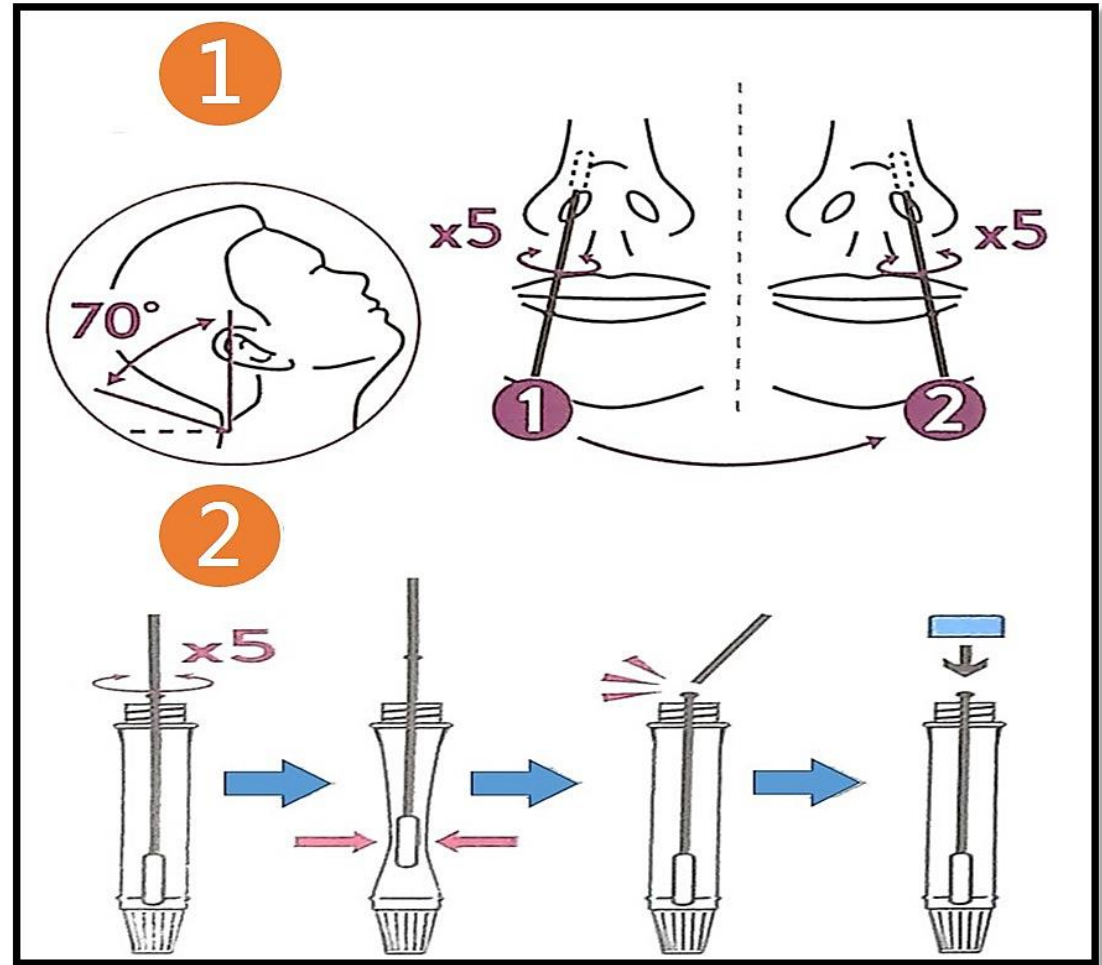

二、放置拭子於萃取管

- 1.將拭子檢體插入萃取管。在緩衝液中旋轉拭子尖端，壓萃取管壁至少 5 次，再以手指擠壓萃取管以擠壓拭子。
- 2.於折斷位置折斷拭子，並且將萃取管的藍色蓋子蓋緊。盡速送至實驗室。

如有使用問題，洽檢驗科門診組分機：(05)2765041 轉分機 5208、5229