




A30

簡易操作手冊

外觀

顯示螢幕

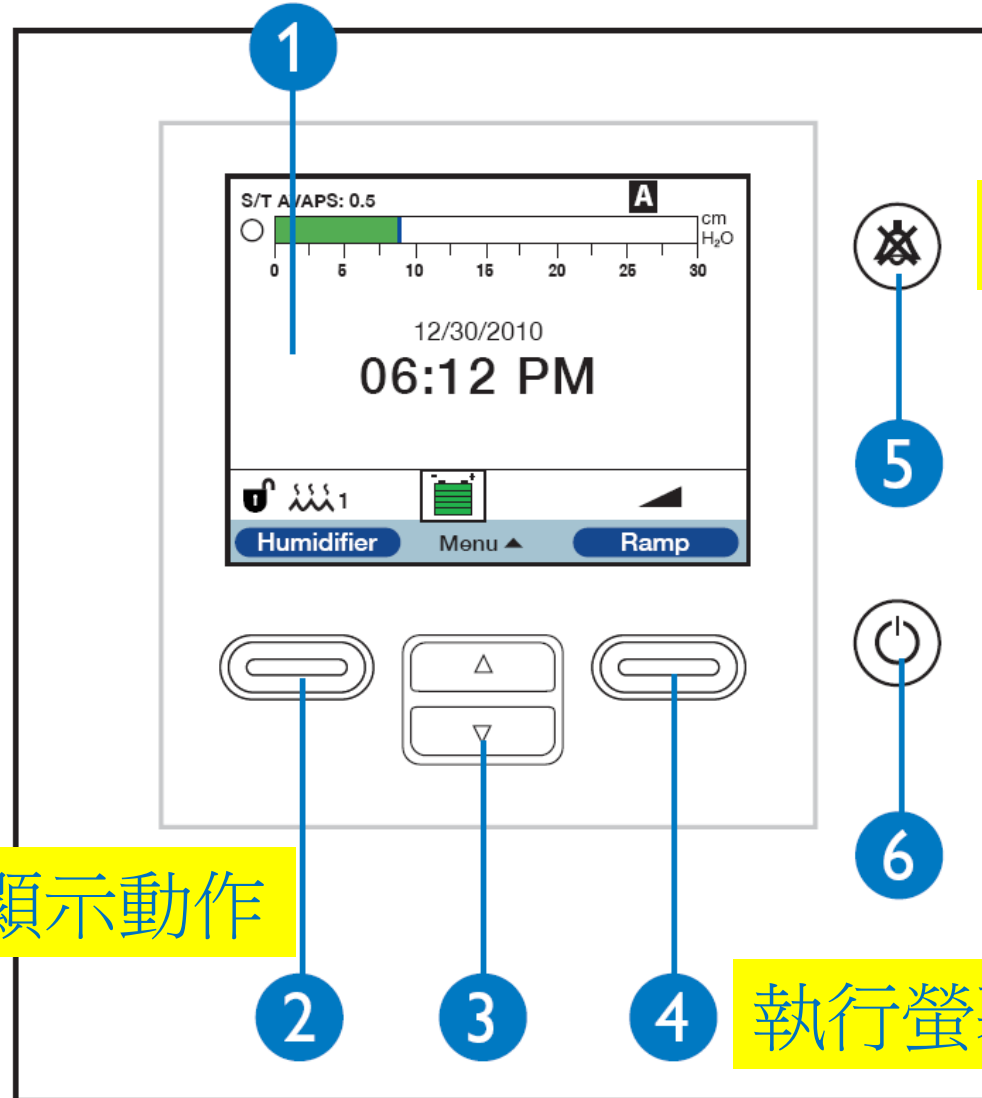

靜音鍵

開/關機鍵

執行螢幕(左下標)顯示動作

執行螢幕(右下標)顯示動作


上下領航鍵

外觀

遠端警報接頭

附件插槽

SD記憶卡插槽

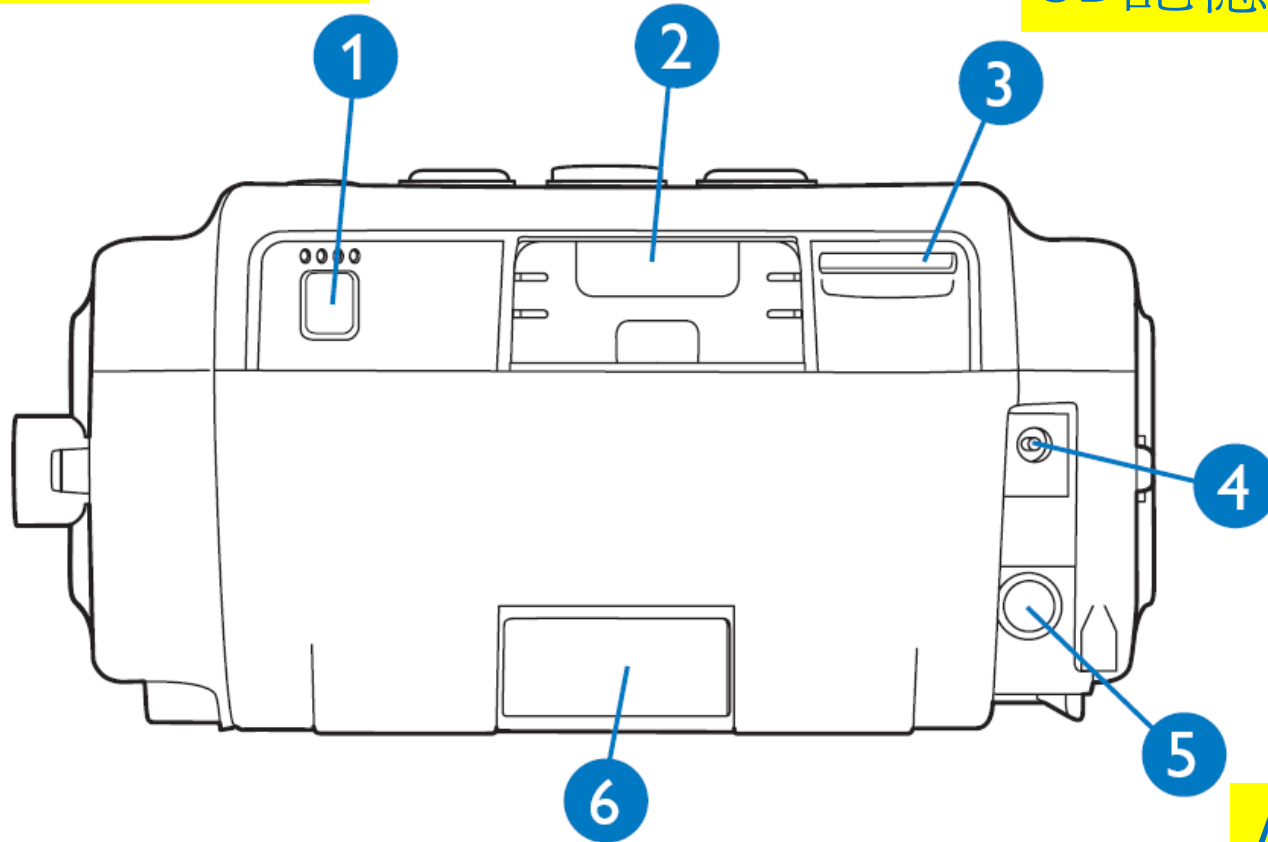

DC直流電源插頭

AC交流電源插頭

空氣進氣過濾孔

主顯示螢幕

通氣模式

AVAPS啟動，壓力增加速度

引動指示標記
(可調整病人or機器)

壓力柱


及時病人參數顯示

設備未上鎖

潮濕器連接(設定值:1)



記憶卡插入

外電池連接使用

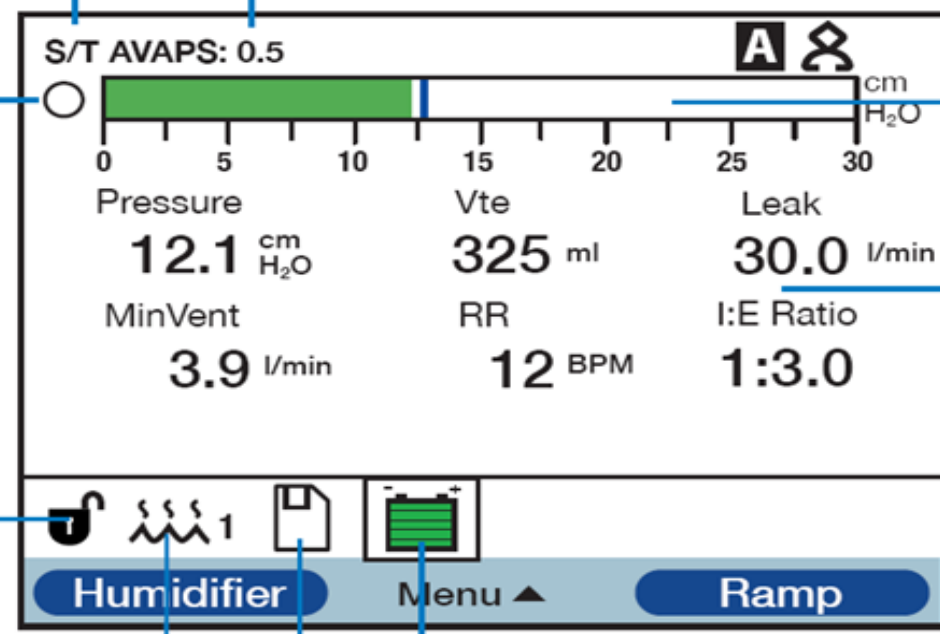


如何啟動/停止 治療

How to start therapy

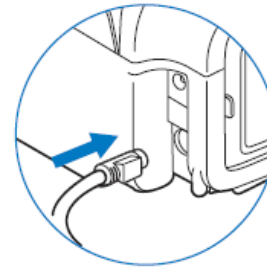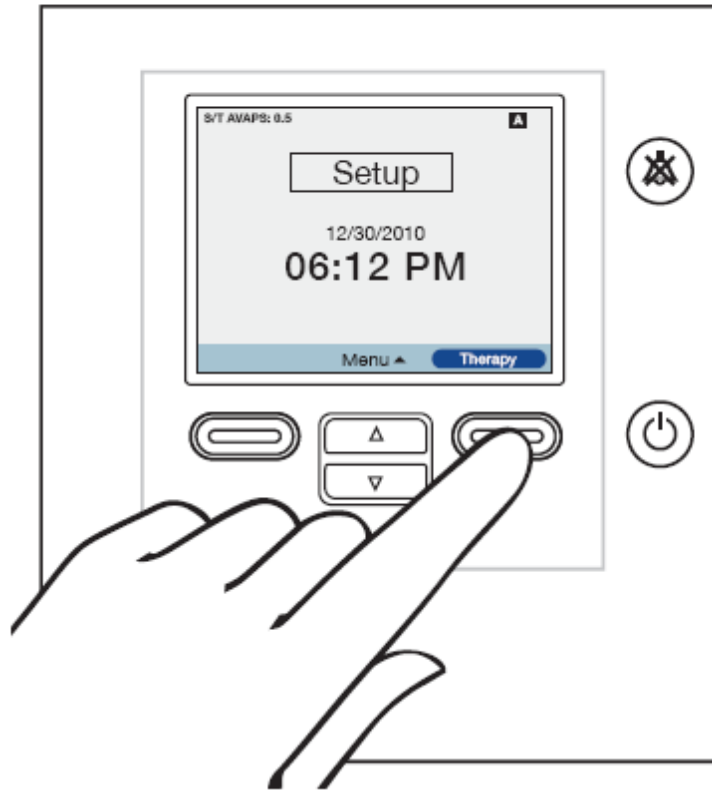

連接 直流/交流電源

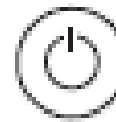



按壓電源鈕，啟動機器

Therapy

按下開始治療

如何啟動/停止 治療

How to stop

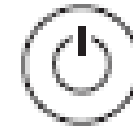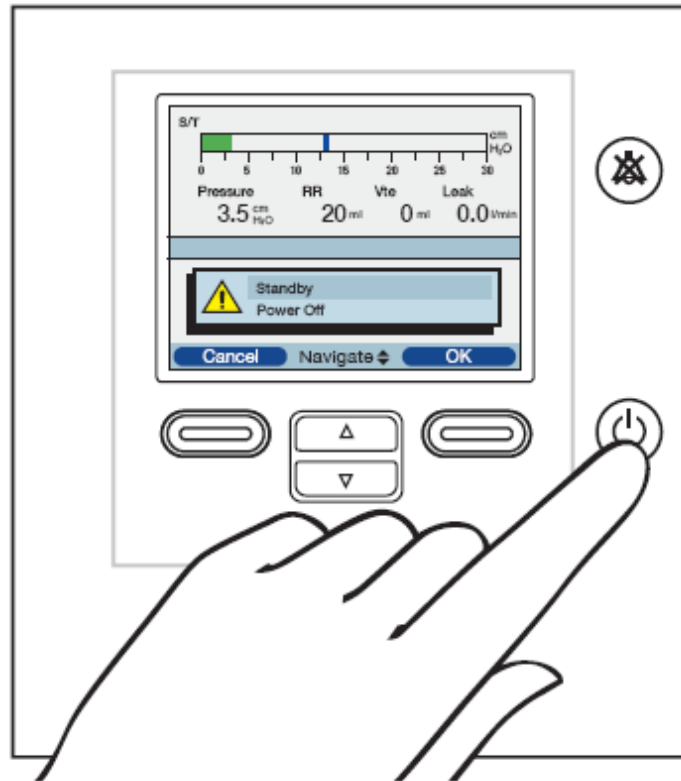

按壓電源鈕

OK

選擇待機，按下ok


OK

選擇關機，按下ok

如何上鎖/解鎖機器


解鎖

同時壓下<警報靜音鍵>以及<下軟鍵>，
五秒鐘即可解鎖

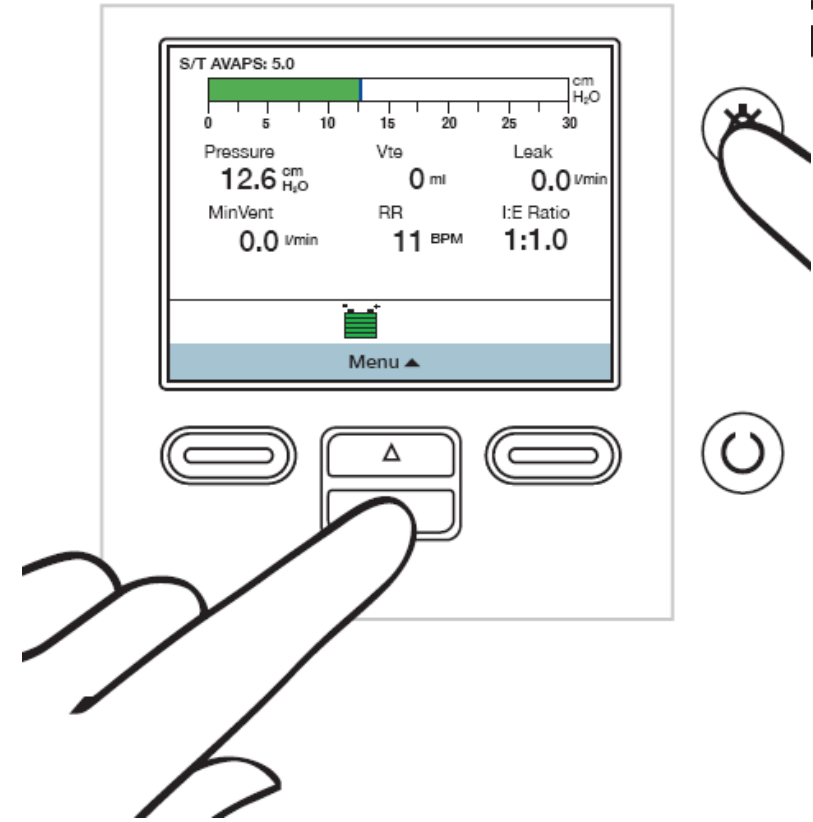


上鎖

選單→Option→Menu Access →
選擇<Limit>

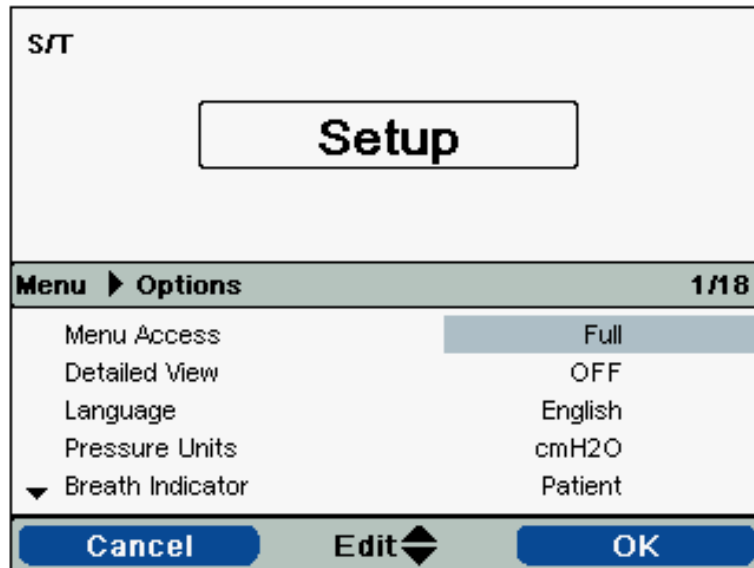

警報顯示視窗

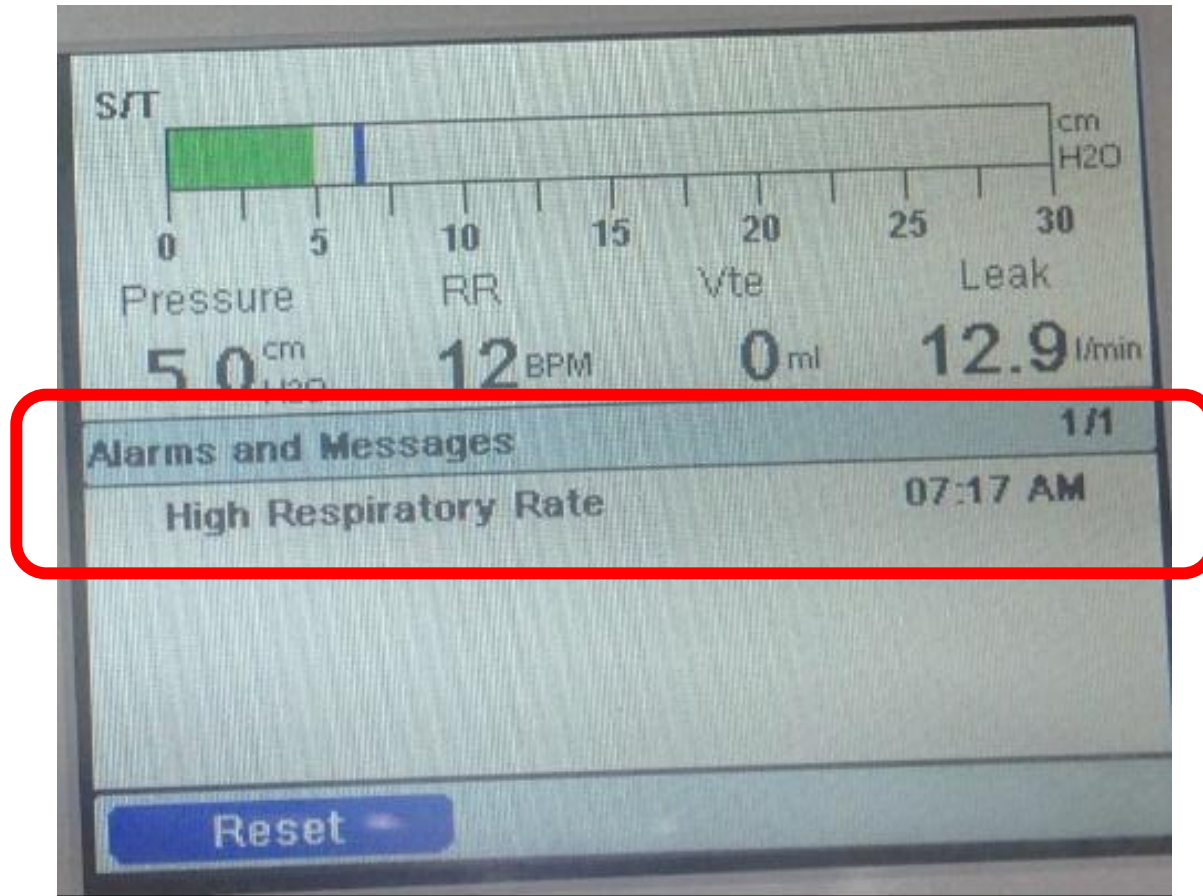

顯示警報時間
以及警報原因

- **病人管路脫離警報 Patient disconnection**
檢視病人管路，面罩是否有脫落情形
- **呼吸停止警報 aponea alarm**
確認病人意識(清醒/昏迷)，及呼吸狀態，若病患意識不清，請立即送醫
- **每分鐘低通氣警報 low minute ventilation**
檢視病患管路/面罩，是否有破損漏氣情形
病患痰是否堆積，呼吸道是否暢通
- **低潮氣容積幾報 low tidal volume**
檢視病患管路/面罩，是否有破損漏氣情形
病患痰是否堆積，呼吸道是否暢通
- **高呼吸次數警報 high respiratory rate**
檢視病患呼吸狀態，是否呼吸急促，若是請立即送醫
管路是否積水